

Genel Bakış ve Hızlı Referans Kılavuzu



AICNow Self Check Test Sistemi

Not: Bu belgedeki tüm kuru veya ıslak test emelleri YALNIZCA Tezgahtar Amacıyla. Lütfen kütüphaneye biriktirmek için saklayın.


1 ÖNEMLİ

- ILK ALABAKIM:** Tüm talimatları dikkatlice okuyunuz ve ptdiagnostics.com adresindeki web sitesinde bulunan kuru eğitim videosuna izlemenizi kesinlikle öneriyoruz. **ADIMLAR:** Belirtilen tüm adımları gerçekleştirerek testi uygulayın.
- Peşleştireli belirlenme kuru aşamayı:** Analizi cihaz üzerindeki lot numarasının peşleştireli olduğu lot numarası ile eşleştirdiğinden emin olun. 18°C - 25°C/64°F - 77°F sıcaklık aralığında, iç ortamda kullanın ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kuru analiz etmedeki tek istisna:** kuru testi için ürünün son kullanma tarihi dolmuş ise ürünü kullanmayın.
- Kit bir süredir önerilen sıcak koşullarda** depolanmışsa veya kit kullanılmadan önce en az bir saat oda sıcaklığında tutun.

25°C (77°F)
18°C (64°F)
Testi 15 dakika içinde tamamlayın.


2 Lot Numaralarını Eşleştirin

Analizi cihazınıza eşleşen orijinal kiti içinde bulunan materyaller ile birleştirin. Analizi cihazın son kullanma tarihi programlanmış test sayısını gerektireceğinden sonra bilebiliriz. Başka bir test kartı veya tahliye, analizi cihazınızda "OÜL" ibaresi görüntülenir.

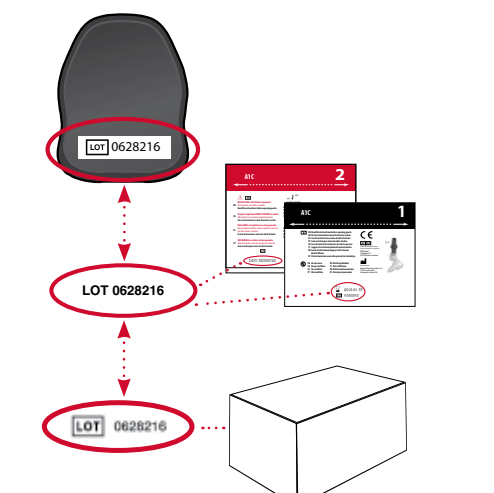


1 Plastik Çalkalayıcı Poşetini Açın*

Folyo kartı poşetini 6. adıma kadar AÇMAYIN.




2 Parmagınızı Delin

Test uygulandıktan önce ellerinizi yıkayın veya alkolle temizleyin ve kuruyun. Kapaklı (kuru ve ıslak) parmağınızı bastırın. *Yeterli miktarda kan elde edebilmek için parmağınızı hafifçe sıkın.

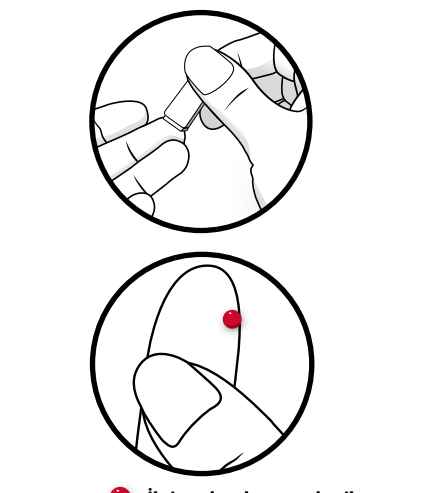


3 Kan Örneği Alın

Kan dökmek için kan kollektörünü kan damlacığı üst kısmına dokundurun. Kollektörün yeterince dolduğundan emin olun.

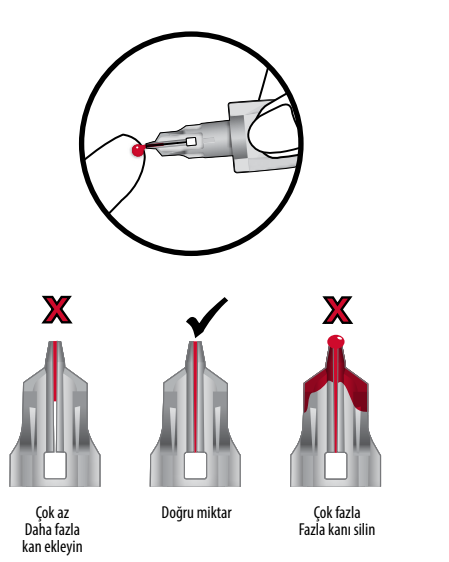


4 Kan Kollektörünü Yerleştirin

Kan kollektörünü çalkalayıcı gövdesine tamamen yerleştirin ve kuruyun. Tamamen yerleştirmek için döndürün ve sıkın.

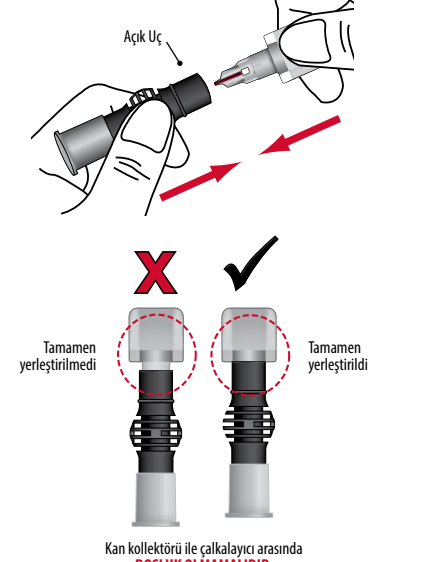

5 Çalkalayın

6-8 kez güçlü bir şekilde çalkalayın (yaklaşık 5 saniye). Bu eylem, kan gazlerinin karışmasını sağlar. Kartıya hazırlanan çalkalayıcıyı musada dik tutun.

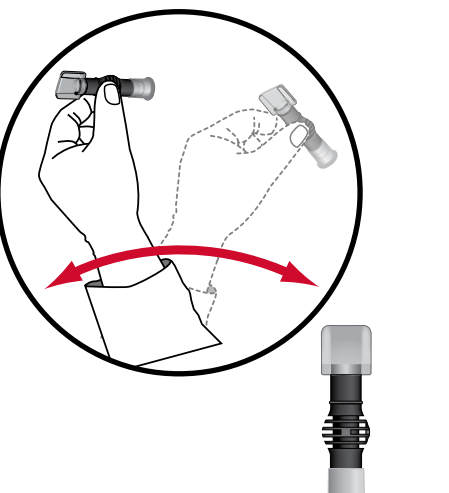

概述和快速参考指南



AICNow Self Check 检测系统

注意: 本说明书中所有产品盒或产品袋的示例都仅具代表性。请参见您的具体套件附带的包装。

1 重要事项

首先, 我们强烈建议您仔细阅读所有说明并查看我们的网站 ptdiagnostics.com 上的简要说明视频。然后, 请按照所有步骤执行检测。请务必在了解说明之前打开产品袋。确保分析纸上的批号与产品袋上的批号相符。请在 18°C - 25°C/64°F - 77°F 的室内避开直射阳光使用。如果盒子温度标签上的圆点变为红色, 或者产品已过有效期, 请勿使用。如果套件曾经被置于超出建议范围的温度条件下, 需在使用前将套件置于室温环境下至少一个小时。

25°C (77°F)
18°C (64°F)
在 15 分钟内完成检测。


2 匹配批号

分析仪仅可与包装套件内的材料配合使用。分析仪将在运行预设的检测次数后失败。如果将试剂插入另一个试剂盒, 分析仪将显示 "OÜL"。




1 打开混合器塑料袋*

在步骤 6 之前切勿打开铝箔试剂盒袋。

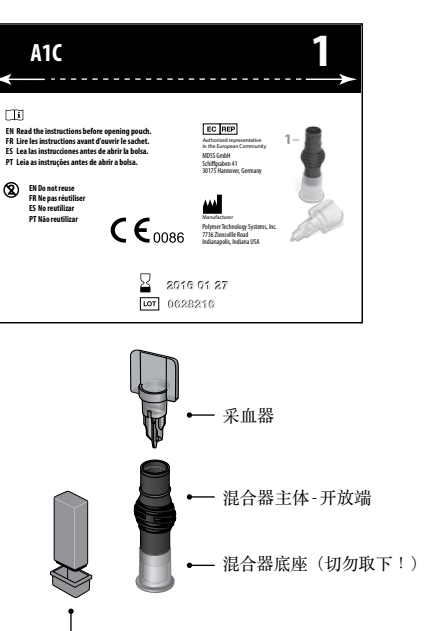


2 刺手指

检测前洗手或用酒精擦净双手并擦干。取下盖子, 将刺针刺入手指。轻轻挤压手指以获取足够血样。

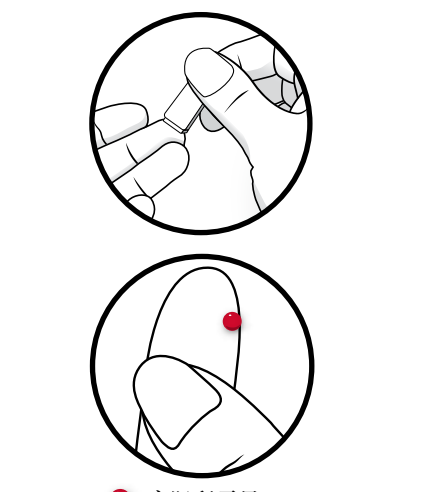


3 采血

将采血器轻轻接触血滴顶部。使其充血。确保采血器充满血液。

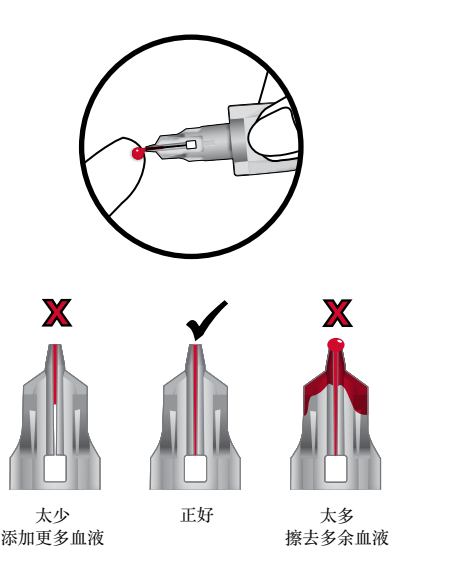


4 插入采血器

将采血器完全插入混合器主体中。一边旋转, 一边用力推动, 直至完全插入。

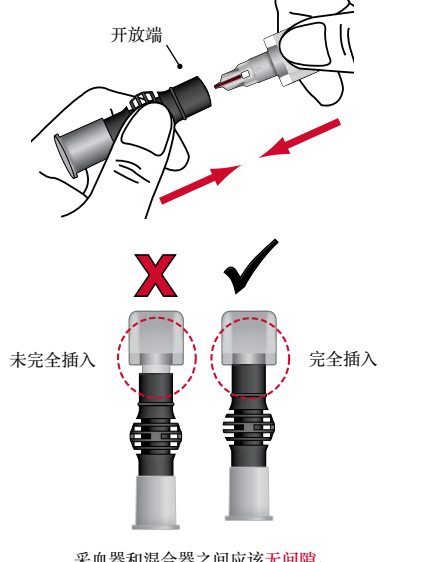

5 混合

用力摇晃 6-8 次 (大约 5 秒)。这会混合血液和溶液。在准备试剂盒时, 将混合器直立放置在桌面上。

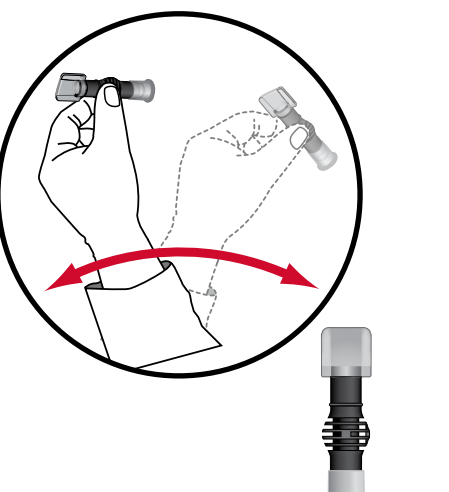

6 在采血后打开打开铝箔试剂盒袋*


立即将试剂盒插入分析仪中, 并在 2 分钟内使用。在边缘处轻触打开铝箔袋。

警告: 在执行此步骤前切勿打开铝箔袋。打开后应在 2 分钟内使用。如果铝箔袋已损坏, 请勿使用。




7 插入试剂盒

将试剂盒正确插入位置并发出 "OÜL"。分析仪和试剂盒的批号需匹配。如果批号不匹配, 请致电 1-877-870-5610 (在美国和加拿大免费) 或 +1-317-870-5610 (直接) 联系客服。



8 准备混合器

取下混合器底座。

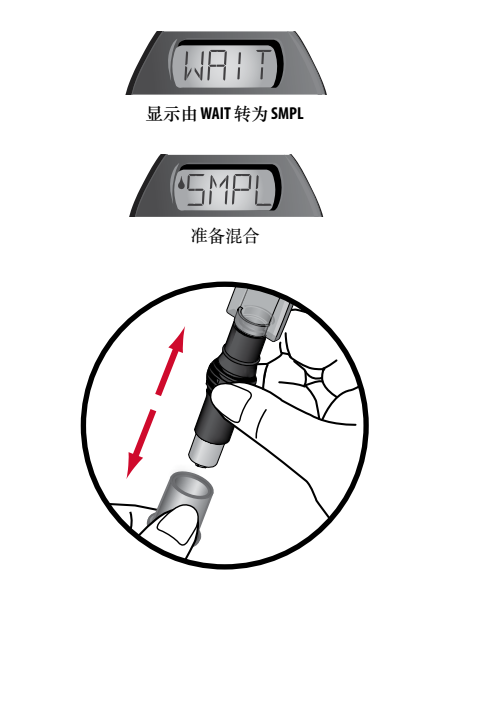


9 将样品放入试剂盒

确保将分析纸置于水平面上。完全放下并推回样品注入。然后以适当的动作挤压。快速从试剂盒中取出采样器。将显示 "OÜL"。




10 5 分钟得出结果

此结果循环可显示 15 分钟, 或者持续到下一个试剂盒插入为止。如果未显示 "OÜL", 请参阅故障排除部分或联系客服。

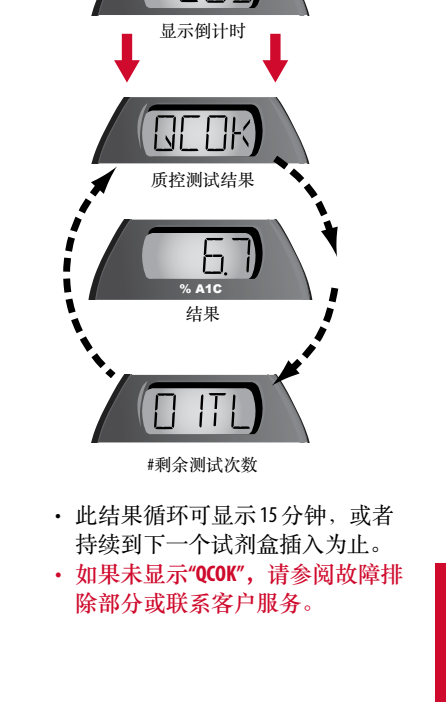


11 处理试剂盒/保存分析仪

将试剂盒作为生活垃圾处理。分析纸分析后, 将分析纸放入指定的回收箱。如果还可以做下一次检测, 分析纸将会显示 "OÜL"。如果正好做完了最后一次检测, 会显示 "OÜL"。在最后一次检测的结果日志中记录您的 AIC 结果。分析仪将显示检测结果 15 分钟, 然后自动关机。

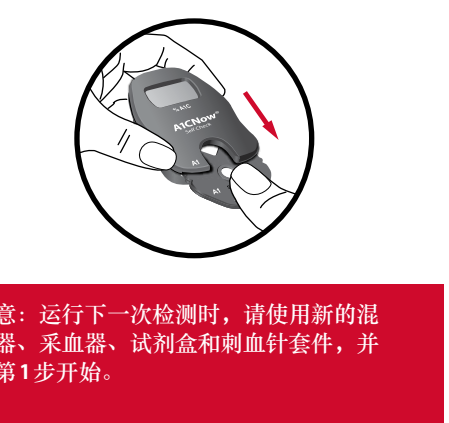

12 记录结果

在此处将结果制成图表。在此处记录 AIC 结果, 然后带着它去看医生。在提供的空格中标记您的 AIC 目标。



结果说明

在向您的保健医生咨询前, 请勿做出任何与医学相关的决定。如果将本产品用于监测患有疾病的情况, 请在您接受过适当培训的情况下, 才可调整治疗方案。

*产品袋插图可能有所不同。

Genel Bakış ve Hızlı Referans Kılavuzu



AICNow Self Check Test Sistemi

注意: 本说明书中所有产品盒或产品袋的示例都仅具代表性。请参见您的具体套件附带的包装。


1 重要事项

首先, 我们强烈建议您仔细阅读所有说明并查看我们的网站 ptdiagnostics.com 上的简要说明视频。然后, 请按照所有步骤执行检测。请务必在了解说明之前打开产品袋。确保分析纸上的批号与产品袋上的批号相符。请在 18°C - 25°C/64°F - 77°F 的室内避开直射阳光使用。如果盒子温度标签上的圆点变为红色, 或者产品已过有效期, 请勿使用。如果套件曾经被置于超出建议范围的温度条件下, 需在使用前将套件置于室温环境下至少一个小时。

25°C (77°F)
18°C (64°F)
在 15 分钟内完成检测。


2 匹配批号

分析仪仅可与包装套件内的材料配合使用。分析仪将在运行预设的检测次数后失败。如果将试剂插入另一个试剂盒, 分析仪将显示 "OÜL"。

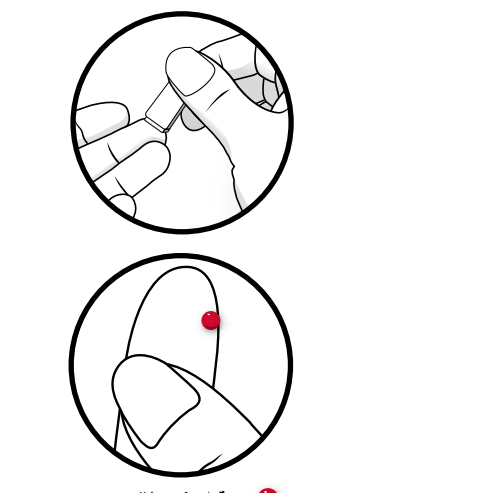

1 打开混合器塑料袋*

在步骤 6 之前切勿打开铝箔试剂盒袋。



2 刺手指

检测前洗手或用酒精擦净双手并擦干。取下盖子, 将刺针刺入手指。轻轻挤压手指以获取足够血样。



3 采血

将采血器轻轻接触血滴顶部。使其充血。确保采血器充满血液。




4 插入采血器

将采血器完全插入混合器主体中。一边旋转, 一边用力推动, 直至完全插入。



5 混合


用力摇晃 6-8 次 (大约 5 秒)。这会混合血液和溶液。在准备试剂盒时, 将混合器直立放置在桌面上。

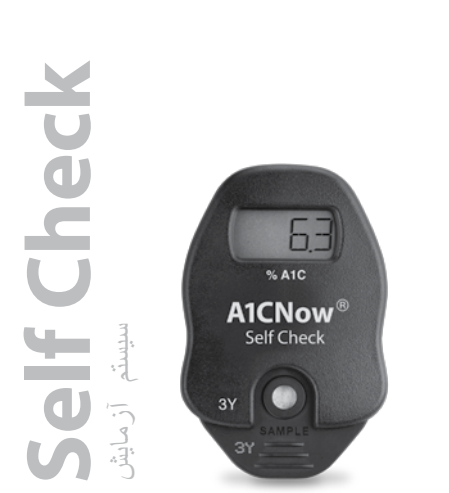

6 在采血后打开打开铝箔试剂盒袋*

立即将试剂盒插入分析仪中, 并在 2 分钟内使用。在边缘处轻触打开铝箔袋。

警告: 在执行此步骤前切勿打开铝箔袋。打开后应在 2 分钟内使用。如果铝箔袋已损坏, 请勿使用。



7 插入试剂盒

将试剂盒正确插入位置并发出 "OÜL"。分析仪和试剂盒的批号需匹配。如果批号不匹配, 请致电 1-877-870-5610 (在美国和加拿大免费) 或 +1-317-870-5610 (直接) 联系客服。



8 准备混合器

取下混合器底座。



9 将样品放入试剂盒

确保将分析纸置于水平面上。完全放下并推回样品注入。然后以适当的动作挤压。快速从试剂盒中取出采样器。将显示 "OÜL"。



10 5 分钟得出结果

此结果循环可显示 15 分钟, 或者持续到下一个试剂盒插入为止。如果未显示 "OÜL", 请参阅故障排除部分或联系客服。



11 处理试剂盒/保存分析仪

将试剂盒作为生活垃圾处理。分析纸分析后, 将分析纸放入指定的回收箱。如果还可以做下一次检测, 分析纸将会显示 "OÜL"。如果正好做完了最后一次检测, 会显示 "OÜL"。在最后一次检测的结果日志中记录您的 AIC 结果。分析仪将显示检测结果 15 分钟, 然后自动关机。



12 记录结果

在此处将结果制成图表。在此处记录 AIC 结果, 然后带着它去看医生。在提供的空格中标记您的 AIC 目标。



结果说明

在向您的保健医生咨询前, 请勿做出任何与医学相关的决定。如果将本产品用于监测患有疾病的情况, 请在您接受过适当培训的情况下, 才可调整治疗方案。

*产品袋插图可能有所不同。

Genel Bakış ve Hızlı Referans Kılavuzu



AICNow Self Check Test Sistemi

注意: 本说明书中所有产品盒或产品袋的示例都仅具代表性。请参见您的具体套件附带的包装。


1 重要事项

首先, 我们强烈建议您仔细阅读所有说明并查看我们的网站 ptdiagnostics.com 上的简要说明视频。然后, 请按照所有步骤执行检测。请务必在了解说明之前打开产品袋。确保分析纸上的批号与产品袋上的批号相符。请在 18°C - 25°C/64°F - 77°F 的室内避开直射阳光使用。如果盒子温度标签上的圆点变为红色, 或者产品已过有效期, 请勿使用。如果套件曾经被置于超出建议范围的温度条件下, 需在使用前将套件置于室温环境下至少一个小时。

25°C (77°F)
18°C (64°F)
在 15 分钟内完成检测。


2 匹配批号

分析仪仅可与包装套件内的材料配合使用。分析仪将在运行预设的检测次数后失败。如果将试剂插入另一个试剂盒, 分析仪将显示 "OÜL"。

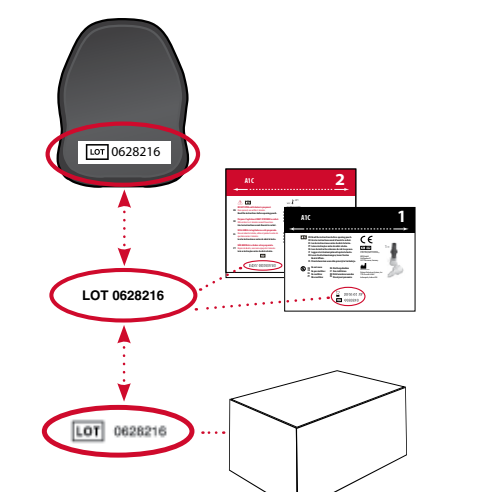


1 打开混合器塑料袋*

在步骤 6 之前切勿打开铝箔试剂盒袋。

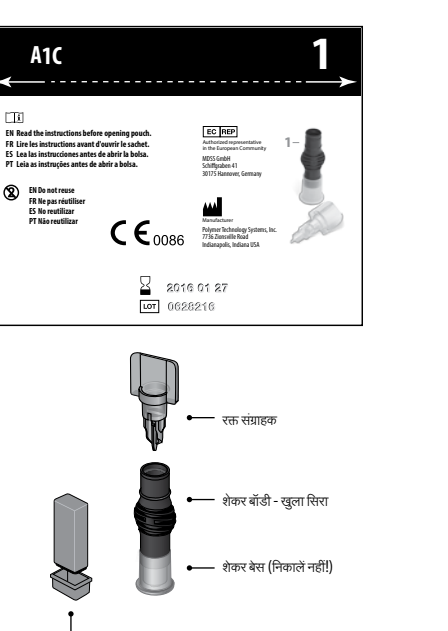


2 刺手指

检测前洗手或用酒精擦净双手并擦干。取下盖子, 将刺针刺入手指。轻轻挤压手指以获取足够血样。

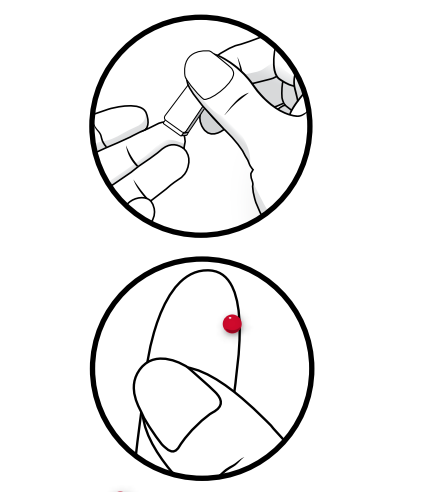


3 采血

将采血器轻轻接触血滴顶部。使其充血。确保采血器充满血液。

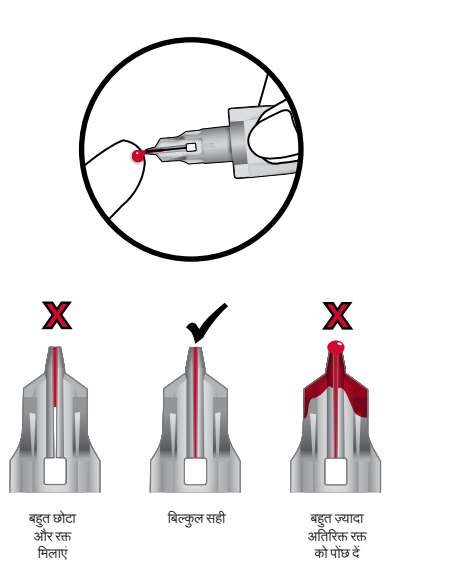


4 插入采血器

将采血器完全插入混合器主体中。一边旋转, 一边用力推动, 直至完全插入。

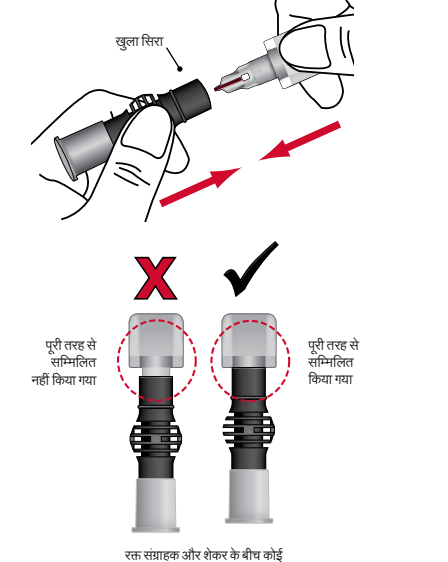

5 混合

用力摇晃 6-8 次 (大约 5 秒)。这会混合血液和溶液。在准备试剂盒时, 将混合器直立放置在桌面上。

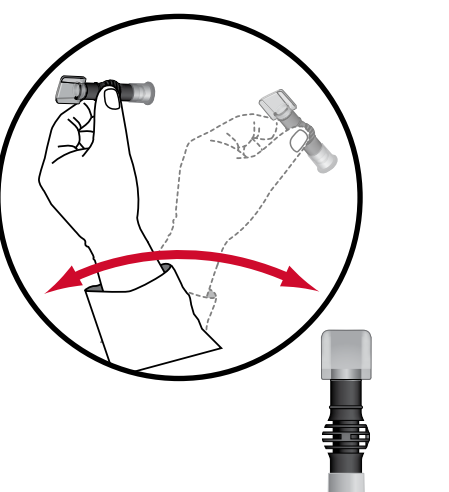

6 在采血后打开打开铝箔试剂盒袋*

立即将试剂盒插入分析仪中, 并在 2 分钟内使用。在边缘处轻触打开铝箔袋。

警告: 在执行此步骤前切勿打开铝箔袋。打开后应在 2 分钟内使用。如果铝箔袋已损坏, 请勿使用。




7 插入试剂盒

将试剂盒正确插入位置并发出 "OÜL"。分析仪和试剂盒的批号需匹配。如果批号不匹配, 请致电 1-877-870-5610 (在美国和加拿大免费) 或 +1-317-870-5610 (直接) 联系客服。



8 准备混合器

取下混合器底座。

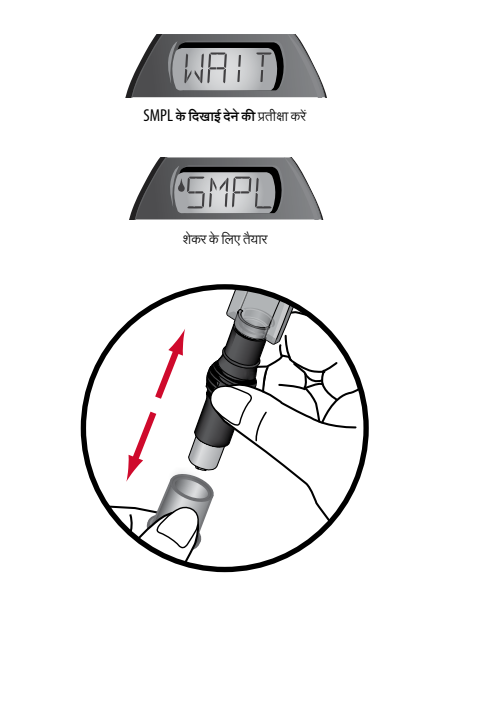


9 将样品放入试剂盒

确保将分析纸置于水平面上。完全放下并推回样品注入。然后以适当的动作挤压。快速从试剂盒中取出采样器。将显示 "OÜL"。




10 5 分钟得出结果

此结果循环可显示 15 分钟, 或者持续到下一个试剂盒插入为止。如果未显示 "OÜL", 请参阅故障排除部分或联系客服。

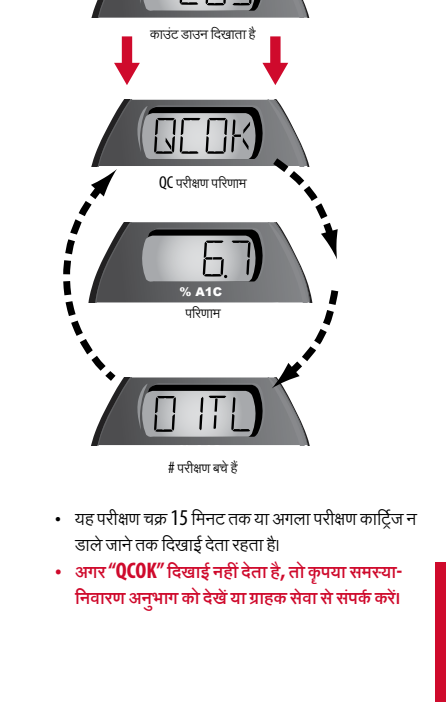


11 处理试剂盒/保存分析仪

将试剂盒作为生活垃圾处理。分析纸分析后, 将分析纸放入指定的回收箱。如果还可以做下一次检测, 分析纸将会显示 "OÜL"。如果正好做完了最后一次检测, 会显示 "OÜL"。在最后一次检测的结果日志中记录您的 AIC 结果。分析仪将显示检测结果 15 分钟, 然后自动关机。

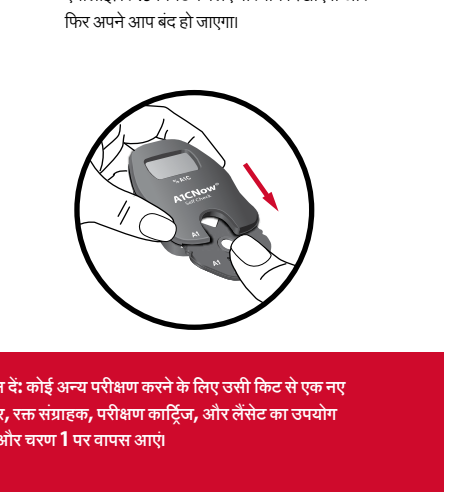

12 记录结果

在此处将结果制成图表。在此处记录 AIC 结果, 然后带着它去看医生。在提供的空格中标记您的 AIC 目标。

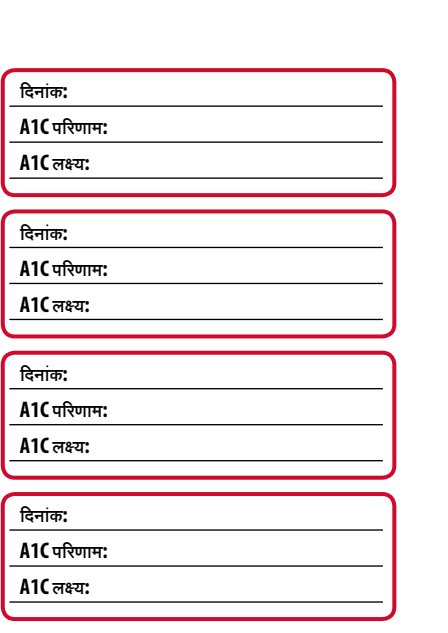

结果说明

在向您的保健医生咨询前, 请勿做出任何与医学相关的决定。如果将本产品用于监测患有疾病的情况, 请在您接受过适当培训的情况下, 才可调整治疗方案。

*产品袋插图可能有所不同。

